

GPC DRY WIPES DISPENSING SYSTEM

Systém suchých utěrek určený k impregnaci dezinfekčním roztokem pro každodenní čištění a dezinfekci povrchů, včetně povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků.



- **praktický systém pro přípravu vlhčených dezinfekčních utěrek**
- **určený k čištění a dezinfekci povrchů**
- **použitelnost až 56 dní po impregnaci**
- **jednoduchá příprava a dávkování**
- **použití i na neinvazivní zdravotnické prostředky**
- **vhodné pro zdravotnická zařízení**

SLOŽENÍ / OBSAH SYSTÉMU:

GPC DRY WIPES DISPENSING SYSTEM obsahuje speciálně navržený dávkovací kbelík a roli netkaných suchých utěrek. Samotný systém neobsahuje dezinfekční prostředek.

OBLAST A NÁVOD NA POUŽITÍ:

Otevřete dávkovací kbelík a vložte do něj roli netkaných utěrek. Utěrky impregnujte 1850 ml dezinfekčního roztoku/přípravku GLOBACID SF med 5 %, GLOBATABS / 5 tablet na 1850 ml vody nebo nefeděným přípravkem GLOBACID AF med. Počkejte přibližně 30 minut, dokud nejsou utěrky zcela nasáklé.

Na štítek uveďte název použitého produktu, koncentraci roztoku, datum přípravy, datum spotřeby a jméno osoby, která roztok připravila. Údaje doporučujeme vyplnit permanentním fixem. Pro odstranění nebo změnu údajů na štítku lze použít přípravky na bázi alkoholu.

Po úplném nasáknutí otevřete víko a vytáhněte utěrku až k perforaci. Povrch důkladně otřete impregnovanou utěrkou tak, aby bylo zajištěno úplné pokrytí dezinfikované plochy. Dodržujte expoziční dobu podle použitého dezinfekčního přípravku.

Při použití výše uvedených přípravků lze připravený systém používat po dobu až 56 dní.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Určeno pro profesionální použití. Systém používejte pouze s vhodným dezinfekčním přípravkem a vždy dodržujte návod k použití, koncentraci a expoziční dobu zvoleného dezinfekčního prostředku.

Deklarovaná použitelnost 56 dní po impregnaci se vztahuje pouze na přípravky GLOBACID SF med 5 %, GLOBATABS / 5 tablet na 1850 ml vody a GLOBACID AF med. Po impregnaci udržujte kbelík uzavřený, aby nedocházelo k vysychání utěrek. Nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby uvedené na štítku.

OBJEDNÁVKOVÉ INFORMACE:

Název produktu

GPC DRY WIPES DISP

DRY WIPES

Balení

4x1 ks

12x200 ks

Číslo výrobku

8-01-015

8-01-016

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Společnost své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

DOBA POUŽITELNOSTI PO PŘÍPRAVĚ:

56 dní po impregnaci dezinfekčním roztokem.

TYP PŘÍPRAVKU:

Zdravotnický prostředek tř. I



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

