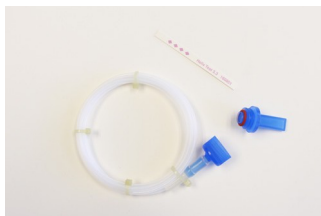
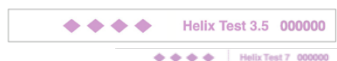


# Getinge Assured

## Helix Test 3.5/7

**Obrázek 1****Obrázek 2****Obrázek 3****1****2****3****Použití**

Test Getinge Assured Helix Test 3.5/7 ověřuje odstranění vzduchu, průnik páry, úroveň expozice a dosažení hlubokého vakua, které jsou nezbytné pro sterilizaci nástrojů s dutým lumenem. Helix Test 3.5/7 je vhodný pro každodenní monitorování sterilizátoru. Test je určen k použití v každém sterilizačním cyklu jako nezávislý kontrolní systém.

**Popis**

Getinge Assured Helix Test 3.5/7 se skládá z následujících částí: standardizované hadičky připojené ke koncovému uzávěru, ochranné kapsle indikátoru s těsnícím "O" kroužkem a indikátorů. (Obrázek 1).

**Návod k použití**

1. Odšroubujte víčko s komůrkou pro indikátor.
2. Vyměňte indikátor Getinge Assured Helix Test 3.5/7 z ochranného fóliového sáčku a přeložte jej na polovinu v místě bodové čáry inkoustem indikátoru směrem dovnitř.
3. Vložte indikátor do víčka přehybem napřed. (Obrázek 2)
4. Zašroubujte uzávěr zpět, dokud nebude těsnit.
5. Umístěte sestavenou testovací sadu Getinge Assured Helix Test do sterilizátoru ve vodorovné poloze poblíž nejméně chladného místa ve sterilizátoru, obvykle nad nad odtokem na spodní části. 6. Spusťte cyklus sterilizátoru.
7. Po 250 cyklech zařízení tělísko zlikvidujte.

**Vyhodnocení**

1. Na konci cyklu vyměňte tělísko Getinge Assured Helix Test 3.5 ze sterilizátoru a před otevřením jej nechte vychladnout. Upozornění: Getinge Assured Helix Test 3.5/7 může být stále horký.
2. Odšroubujte víčko a indikátor vyměňte testovací proužek. Odečtěte výsledky.
3. Změna barvy z růžové na černou signalizuje uspokojivé odstranění vzduchu a pronikání páry do dutiny. Přítomnost jakékoli zbývající růžové barvy znamená nedostatečné podmínky sterilizace a doporučuje se opětovná sterilizace.
4. Výsledky zdokumentujte podle požadavků nemocničních procesů.
5. Odstraňte ochranný lepicí podklad ohnutím indikátoru. Jednotlivé zpracované indikátory přilepte k záznamům podle zásad nemocnice. (Obrázek 3)
6. Před dalším použitím nechte tělísko vychladnout a vyschnout. Vyhleďte zbytky vody, které by mohly blokovat volný průchod vzduchu nebo páry po celé délce dutiny. V případě přítomnosti vody tělísko nepoužívejte.
7. Umístěte otevřené tělísko na teplé a suché místo..

**Změna barvy**

- 1 před expozicí 2 Uspokojivý výsledek 3 Chyba

**Skladování**

Skladujte při běžné pokojové teplotě 10°-38 °C a relativní vlhkosti 10-60 %. Chraňte před vlhkostí a nadměrnou vlhkostí. Vystavené indikátory skladujte mimo dosah světelných zdrojů.

**Doba použití**

Datum spotřeby je uvedeno na obalu výrobku. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

**Interferující látky nebo podmínky**

Nejsou známy žádné rušivé látky nebo podmínky, které by mohly ovlivnit zamýšlené použití indikátoru nebo nepříznivě ovlivnit jeho výkonnost.

**Uvolňování toxických látek**

Indikátor neuvolňuje žádné známé toxické látky v množství, které by mohlo ohrozit zdraví nebo zamýšlené vlastnosti sterilizovaného výrobku před, během nebo po sterilizaci.