

schülke -†



Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi KAS, aminu a biguanidu, určený pro dezinfekci a mytí ploch a povrchů zdravotnických prostředků.

Výborná
materiálová
kompatibilita

desam[®] effekt

Naše Plus

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Účinný od 0,25% koncentrace
- Výborná materiálová snášenlivost
- Použití i v přítomnosti pacientů
- Kompatibilní s utěrkami wetsack a schülke wipes

Oblast použití

desam[®] effekt je vhodný pro každodenní dezinfekci ploch a povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků ve všech prostorách zdravotnických zařízení (vč. operačních sálů, JIP, neonatologie, rehabilitace). Je vhodný také na citlivé plasty (plexisklo). Přípravek lze používat i v přítomnosti pacientů.

Účinnost

Baktericidní, virucidní na BVDV / Vaccinia / Rota, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

desam[®] effekt se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě (20-25 °C). K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Pracovní roztok lze aplikovat postřikem. Nemíchejte s žádnými jinými čisticími či dezinfekčními přípravky.

desam[®] effekt je určen na všechny voděodolné a omyvatelné povrchy a předměty (nerezová ocel, barevné kovy a jejich slitiny, pochromované a smaltované povrchy, povrchy

potažené plastem, sklo, plexisklo, akryláty, pryž). Nepoužívat na hliník a mechanicky poškozené povrchy.

CE 1023



Složení

100 g desam[®] effekt obsahuje následující účinné látky:

- 2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
- 5 g Poly (hexametylenbiguanid) hydrochlorid
- 5 g Didecylmethylamonium-chlorid

Další složení:

povrchové aktivní látky, parfém

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Plochy a předměty, které byly ošetřeny směsí a mají přijít do přímého styku s potravinami, musí být důkladně (několikanásobně) opláchnuty pitnou vodou. Není vhodný na povrchy s pozinkovaným povrchem, kůže a neošetřené dřevo, barevně nestabilní a porézní materiály.

Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Desam effekt 1 l	12/Karton	70000068
Desam effekt 5 kg	1/Kanistr	70000069



Související přípravky

- antifect[®] extra
- terralin[®] protect

Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek tř. IIa



Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com