

Název výrobku: Getinge Batch Monitoring Systém

6005500575 – kovové tělísko

6005500037 - indikátorové proužky pro 134°C/3,5 min

6005500040 – indikátorové proužky pro °C/7 min

Zařazení: typ 2 pro zvláštní zkoušky**Typ testu:** chemický test průniku sterilizačního média do kritických částí nástrojů**Bližší specifikace:** k použití s kovovým tělískem, v jehož víčku je komůrka pro vložení indikátorového proužku**Typ sterilizace:** vlhké teplo/pára**Expozice:** 134°C/3,5 minuty nebo 7 minut**Použití:**

1. Odšroubujte víčko s komůrkou pro indikátor.
2. Vyjměte indikátor Getinge Assured Helix Test z ochranného fóliového sáčku a přeložte jej na polovinu v místě bodové čáry inkoustem indikátoru směrem dovnitř.
3. Vložte indikátor do víčka přehybem napřed a to bezprostředně před použitím.
4. Zašroubujte uzávěr zpět, dokud nebude těsnit.
5. Umístěte sestavenou testovací sadu Getinge Batch Monitoring System do sterilizátoru ve vodorovné poloze poblíž nejchladnějšího místa ve sterilizátoru, obvykle nad odtokem ve spodní části nebo jej zavěste na nakládací vozík blízko dveří.
6. Spusťte cyklus sterilizátoru.

Vyhodnocení:

1. Na konci cyklu vyjměte tělísko Getinge Batch Monitoring System ze sterilizátoru, před otevřením jej nechte vychladnout. Upozornění: POZOR! Tělísko bude velmi horké! Hrozí popálení! Používejte ochranné pomůcky!
2. Odšroubujte víčko a vyjměte testovací proužek. Odečtěte výsledky.
3. Změna barvy z růžové na černou signalizuje uspokojivé odstranění vzduchu a pronikání páry do dutiny. Přítomnost jakékoli zbývající růžové barvy znamená nedostatečné podmínky sterilizace a doporučuje se opětovná sterilizace.
4. Výsledky zdokumentujte podle požadavků nemocničních procesů.
5. Odstraňte ochranný lepicí podklad ohnutím indikátoru. Jednotlivé zpracované indikátory přilepte k záznamům podle zásad nemocnice.
6. Před dalším použitím nechte tělísko vychladnout a vyschnout. Pokud je v něm voda, nesmí být použito. Může být opětovně použito i když je ještě teplé, proužek indikátoru ale vkládejte do jeho víčka těsně před zapnutím sterilizátoru.

Skladování: v originálním obalu na suchém místě při relativní vlhkosti 10 - 60 % a při pokojové teplotě 10°C - 38°C.

Při skladování indikátorů po expozici je chraňte před přímým slunečním světlem.

Expirace: viz datum uvedené na obalu. Po datu použitelnosti výrobek nepoužívejte.**Interferující látky:** žádné nejsou známy.**Uvolňování toxických látek:** žádné, které by mohly ohrozit lidské zdraví nebo vlastnosti výrobku.**Klasifikace:** ČSN EN ISO 11140-1, ČSN EN 867-5**Obsah balení:** 6005500575 - kovové tělísko, ochranné ruckavice, víčko
6005500037 - 250 indikátorových proužků + víčko
6005500040 – 250 indikátorových proužků + víčko**Aktualizace (datum/iniciály pracovníka):** 5/2023/JK**Text**

Před expozicí



Správný výsledek



Nesprávný výsledek

Getinge AB Lindholmspiren 7
P.O. Box 8861 SE-417 56
Göteborg Sweden
+46 (0)10 335 0000